

Hemorroidas são muito comuns em homens e mulheres e pode se desenvolver por diferentes causas. Localizadas no reto inferior, as hemorroidas podem inflamar-se e causar sangramento, coceira, inchaço ou outros sintomas incômodos.



Se tiver quaisquer problemas após o procedimento, contacte o seu médico.



2855 Boardwalk Drive
Ann Arbor, MI 48104
877.552.4027

MTEndoscopy.com
customercare@mtendoscopy.com



LIGADURA DE HEMORRÓIDAS SEGUIMENTO DO TRATAMENTO, CUIDADOS E PERGUNTAS FREQUENTES



A ligadura de hemorroidas é um método muito comum e bem conhecido de tratamento de hemorroidas internas. Ao contrário dos remédios de venda livre, que funcionam apenas temporariamente, as bandas elásticas oferecem uma solução de longo prazo. A ligadura de hemorroidas é um procedimento não cirúrgico, praticamente indolor, que um médico pode realizar em seu consultório.

O procedimento envolve a colocação de uma pequena banda elástica ao redor da base da hemorroida usando o sistema InSight™. A compressão criada pela ligadura diminui o suprimento sanguíneo para a hemorroida, fazendo com que ela encolha e eventualmente caia. Isso deixa uma pequena cicatriz que cura em poucos dias.



PERGUNTAS FREQUENTES

O QUE POSSO COMER APÓS O PROCEDIMENTO?

Recomenda-se beber líquidos abundantes e aumentar a ingestão de fibras, fazendo uma ou duas vezes por dia por vários dias após a ligadura.

PRECISO RESTRINGIR MINHAS ATIVIDADES APÓS O PROCEDIMENTO?

É aconselhável evitar exercícios intensos por 1-2 dias após o procedimento de ligadura. Evite ficar sentado por um longo período de tempo. A menos que lhe tenha sido prescrito um medicamento supositório, não coloque nada no seu reto durante duas semanas após o procedimento.

A LIGADURA CAUSA DOR?

A ligadura hemorroidária não causa dor porque a ligadura é realizada acima da linha pectínea, uma seção do reto que contém uma concentração muito baixa de nervos sensíveis à dor. Alguns pacientes podem sentir um leve desconforto ou uma sensação de plenitude que geralmente pode ser tratada com paracetamol ou ibuprofeno, conforme indicado por seu médico.

QUANTAS INTERVENÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Seu médico pode decidir tratar várias hemorroidas em uma única visita, e estudos mostraram que a ligadura multibanda é segura e eficaz. Isso pode variar de paciente para paciente e será determinado pelo seu médico.

TODAS AS HEMORROIDAS NÃO DEVEM SER REMOVIDAS CIRURGICAMENTE?

Não, estima-se que 95% das hemorroidas podem ser tratadas usando um sistema de ligadura como o InSight.

QUEM SÃO CANDIDATOS IDEAIS PARA A LIGADURA?

A grande maioria dos pacientes com doença hemorroidária são excelentes candidatos ao procedimento. O InSight é adequado para praticamente todos os pacientes com doença de grau I a III.

COMO FUNCIONA A LIGADURA?

Um pequeno anel elástico sem látex é colocado ao redor da base da hemorroida, o que corta o suprimento de sangue para a área. Depois de alguns dias, o tecido e o anel elástico vão encolher e cair, geralmente sem que você perceba.

